

Q TRU BALANCE[®] 4

EINRICHTUNGSANLEITUNG



QUANTUM[®]

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

WARNUNG!

Ein Vertragslieferant oder ein qualifizierter Techniker muss die Ersteinrichtung dieses Produkts vornehmen und alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.

Bei anterioren Neigungsfunktionen ist eine Brustunterstützung erforderlich. Das Weglassen einer Auswahl an Bruststützen erfordert, dass der Anbieter nachgerüstete Bruststützen bereitstellt, die den Bedürfnissen der Verbraucher am besten entsprechen.

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt laufend verwendet und dienen zur Kennzeichnung von Warnungen und wichtigen Informationen. Es ist äußerst wichtig, diese zu lesen und vollständig zu verstehen.

WARNUNG!

Angaben von potenziell giftigem Zustand/Situation. Nichteinhaltung der ausgewiesenen Prozeduren kann entweder zu Personenschaden, Beschädigung der Bestandteile oder Fehlfunktion führen. Auf dem Produkt ist dieses Icon als schwarzes Symbol oder gelbes Dreieck mit schwarzem Rahmen angegeben.

VORGESCHRIEBEN!

Diese Aktionen sollten wie angegeben ausgeführt werden. Nichteinhaltung der verbindlichen Aktionen kann zu Personenschaden und/oder Beschädigung der Ausrüstung führen. Auf dem Produkt ist dieses Icon als weißes Symbol auf einem blauen Punkt mit weißem Rahmen angegeben.

VERBOTEN!

Diese Aktionen sind nicht zulässig. Diese Aktionen sollten zu keiner Zeit oder Umstand durchgeführt werden. Die Durchführung einer nicht zugelassenen Aktion kann zu Personenschaden und/oder Beschädigung der Ausrüstung führen. Auf dem Produkt ist dieses Icon durch ein schwarzes Symbol mit einem roten Kreis und rotem Querstrich angegeben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Verwendungszweck dieses Geräts von Pride Mobility Products ist die Bereitstellung von Mobilitätsunterstützung für Personen mit eingeschränkter Mobilität, die in der Lage sind, einen motorisierten Elektrorollstuhl im Innen- und Außenbereich zu bedienen.

Hinweis zur Ärztlichen Verordnung von Geräten

Unsere Mobilitätsprodukte und ihre Komponenten sind entweder im Einzelhandel („over-the-counter“) oder auf Rezept erhältlich. Wenn verschrieben, gilt die folgende Erklärung.

WARNUNG!

VORSICHT! Bundesgesetze beschränken dieses Gerät auf den Verkauf durch oder auf Anweisung eines Arztes oder anderen zertifizierten Personals, das nach dem Recht des Bundesstaates (nur USA) oder der Region, in der dieses Personal zur Verwendung des Geräts praktiziert oder die Verwendung anordnet, zugelassen ist.

HINWEIS: Diese Anweisungen wurden aus den neuesten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Spezifikationen und Produktinformationen zusammengestellt. Wir behalten uns vor, bei Bedarf Änderungen vorzunehmen. Alle Änderungen an unseren Produkten können geringe Unterschiede zwischen den Abbildungen und Erläuterungen in diesem Handbuch und dem von Ihnen erworbenen Produkt verursachen. Die letzte/neueste Version dieses Handbuchs ist auf unserer Website verfügbar.

HINWEIS: Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der WEEE-, RoHS- und REACH-Richtlinien.

HINWEIS: Dieses Produkt entspricht IPX4 Klassifizierung (IEC 60529).

HINWEIS: Der Q-Logic 3 oder Q-Logic 3e Controller und seine Komponenten bestehen nicht aus Naturkautschuklatex. Wenden Sie sich bezüglich jeglichem Zubehör für den After-Market an den Hersteller.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Einrichtungsrichtlinien | 5 |
| Neue Parameter | 6 |
| Speicher 1 - 4 | 7 |
| Programmierung | |
| Elektrorollstuhl aus der Box..... | 8 |
| Gewichtsausgleich..... | 8 |
| Fußplatten zur Bodenhemmung..... | 8 |
| Anteriore Neigungs- und Transferposition | 9 |
| Speicherprogrammierung..... | 10 |

BERATENDE ERKLÄRUNG ZU BESTIMMTEN KOMPONENTEN, DIE VON HERSTELLERN VON DRITTANBIETERN IN BEENDETE LEISTUNGSSTÜHLE EINGEBAUT WERDEN: Wenn Leistungssockel, Sitzsysteme oder andere Komponenten in einen fertigen Elektrorollstuhl eingebaut werden, der von Dritten hergestellt oder montiert wird, ist dieser Dritte für die Gewährleistung der Sicherheit verantwortlich, Funktionalität und rechtliche Konformität des fertigen Elektrorollstuhls. Wir übernehmen keine Gewähr für die Sicherheit, Funktionalität oder Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des fertigen Elektrorollstuhls oder seiner von Dritten hergestellten Komponenten. Obwohl wir alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass unsere Komponenten verantwortungsbewusst vertrieben werden, werden Hersteller, Händler und Verbraucher daran erinnert, dass fertige Elektrorollstühle eine Vielzahl von staatlichen Standards und Anforderungen für Sicherheit und Funktionalität erfüllen müssen.

Wenn es notwendig ist, einen Elektrorollstuhl physisch zu modifizieren, einschließlich des Hinzufügens von Komponenten von Drittanbietern, um den medizinischen Bedürfnissen des Rollstuhlfahrers gerecht zu werden, sollte eine Risikobewertung gemäß ISO 14971, wie in ISO_7176 beschrieben, durchgeführt werden durchgeführt werden.

Zu den Änderungen an Elektrorollstühlen, die sich wahrscheinlich auf die Konformität und Risikobewertung auswirken, gehören unter anderem: Verschieben der Sicherungspunkthalterungen; Absenken der Rückenstützenhöhe; Verkürzung der Sitzlänge; Hinzufügen von sekundären Haltungsstützen, die nicht fest am Elektrorollstuhl befestigt sind; Hinzufügen von Komponenten mit scharfen Kanten (d. h. Kanten mit einem Radius von weniger als 2 mm [0.08 Zoll]); oder jede Änderung, die die strukturelle Integrität des elektrischen Stuhlrahmens beeinträchtigt.

HINWEIS: In der Ihrem Elektrorollstuhl beiliegenden Verbrauchersicherheit sind weitere Warnhinweise aufgeführt und erläutert. Bitte machen Sie sich mit allen Warnhinweisen und Sicherheitsinformationen im Leitfaden zur Verbrauchersicherheit vertraut und ziehen Sie diese Ressource häufig zu Rate.

Bevor Sie Änderungen an den vorprogrammierten Parametern des Controllers vornehmen, lesen Sie bitte die Q-Logic 3 oder Q-Logic 3e Basic Operation Instructions und den Consumer Safety Guide, die dem Elektrorollstuhl beiliegen.

WARNUNG!

Ein Quantum Rehab-Anbieter oder ein qualifizierter Techniker muss die Ersteinrichtung dieses Elektrorollstuhls und alle Verfahren in diesem Handbuch durchführen.

Legen Sie beim Betrieb des Elektrorollstuhls immer den Positionierungsgurt an.

HINWEIS: Der Endbenutzer muss die richtigen Sequenzen befolgen, um das gewünschte Eingabegerät zu aktivieren.

Quantum TRU Balance® 4 Einrichtungsanleitung

Das TRU Balance 4 Power Positioning System erfordert vor der Verwendung eine zusätzliche Programmierung und Einrichtung durch einen geschulten Fachmann. Es gibt mehrere neue Programmieroptionen, die bei der Lieferung eingerichtet werden MÜSSEN. Es ist wichtig, dass diese zusammen mit der Installation der Stealth-Kniestützen und der Bruststange abgeschlossen werden, sofern der Elektrorollstuhl damit konfiguriert wurde.

WARNUNG!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts und alle ergänzenden Informationen vollständig durch, bevor Sie den Stuhl in Betrieb nehmen.

**BITTE
STOP
ZUERST LESEN**



RECYCLING UND ENTSORGUNG

Karton kann recycelt werden. Entsorgen Sie den Verpackungsschaum in Übereinstimmung mit den staatlichen oder lokalen gesetzlichen Bestimmungen.

VOR AUSPACKUNG LESEN

Sichtbarer Verlust oder Beschädigung

Wenn nach Erhalt dieser Sendung durch Sichtprüfung Anzeichen von Verlust oder Beschädigung festgestellt werden, muss dies auf dem Frachtbrief vermerkt und vom Vertreter des Spediteurs unterzeichnet werden. Andernfalls kann es zur Weigerung des Spediteurs führen, Verlust- oder Schadensansprüche zu erfüllen. Der Spediteur stellt Ihnen die erforderlichen Formulare zur Verfügung, um den Anspruch geltend zu machen.

Verlust oder versteckte Beschädigung

Wenn der Schadensverlust erst beim Auspacken des Geräts erkennbar ist, ist eine Reklamation wegen verdeckten Verlusts oder Schadens erforderlich. Wenn Schäden festgestellt werden, geben Sie dem Spediteur eine schriftliche Erklärung zur Inspektion ab. Diese Anfrage muss innerhalb von 48 Stunden nach Lieferung gestellt werden. Bewahren Sie alle Kartons und Füller zur Inspektion auf. Der Spediteur stellt einen Inspektionsbericht und die erforderlichen Formulare zur Verfügung, um Ansprüche auf verdeckte Verluste oder Schäden geltend zu machen, da solche Schäden oder Verluste in der Verantwortung des Spediteurs liegen.

VORSICHTSMASSNAHMEN vor dem Test/Gebrauch

WARNUNG!

Bei Belastung der unteren Extremitäten in dieser Position sollte zur Vorbeugung von Frakturen die Gewichtsbelastung oder die Stehfreiheit von einem Arzt oder klinischen Experten bestätigt werden.

Informieren Sie sich über das Vorhandensein von Schmerzen oder Tonus/Spastik im gesamten Körper des Klienten, die sich bei einem Positionswechsel verschlimmern könnten.

Seien Sie wachsam und überwachen Sie alle signifikanten Veränderungen des Blutdrucks, die dazu beitragen könnten, dass ein Kunde ohnmächtig wird. Es wird empfohlen, während der ersten Anwendung eine Blutdrucküberwachung durchzuführen.

Sichern Sie alle Sicherheitskomponenten ordnungsgemäß, um Gleichgewichtsverlust oder ungewollte Positionsänderungen zu vermeiden, indem Sie Folgendes hinzufügen, bewerten oder sichern: Brustgurt, Bruststange, Knieblöcke, Seiten- oder Hüftführungen, Fußpositionierung usw.

Ziehen Sie den Beckengurt eines Kunden NICHT an, sobald er sich in anteriorer Neigung befindet. Dadurch wird vermieden, dass es zu eng wird, nachdem Sie in eine vorherige Position zurückgekehrt sind.

Informieren Sie sich über vorhandene Hautverletzungen (Dekubitus), die durch veränderte Winkel des Sitzsystems beeinträchtigt werden können. Beurteilen Sie auch einmal in der endgültigen Position die richtige Druckverteilung über die Sitzkomponenten, um einen übermäßigen Druck in einem Bereich zu vermeiden.

Nicht geeignet für anteriore Neigung, wenn vor kurzem eine Hautlappenoperation durchgeführt wurde, es sei denn, es liegt eine ärztliche Genehmigung vor.

Überprüfen Sie alle Leitungen und Schläuche der medizinischen Geräte des Kunden und deren Platzierung. Beispiele: Beatmungsgerät, Ernährungssonde, Pulschse, Sauerstoff, Katheterbeutel Schlauch.

SET-UP-Richtlinien:

Knieblockplatzierung vor anteriorer Neigung:

1. Direkt unter der Kniescheibe.
2. Tiefe: Mindestens 1 Hand zwischen Pad und Kunde (1"-1,5" Abstand).
3. Stellen Sie sicher, dass die unteren Extremitäten in neutraler Ausrichtung mit zusätzlichen Stützen sind, falls erforderlich (Oberschenkel- oder Knieführungen zur Verhinderung einer Abduktion).
4. Der Knieblocker sollte nicht entfernt werden, wenn er sich in einer Anterior-Tilt-Position befindet.

Bruststange:

WARNUNG!

Bei Funktionen zur Neigung nach vorne ist eine Unterstützung der Brust erforderlich. Wenn der Anbieter auf die Auswahl einer Bruststütze verzichtet, muss er Aftermarket-Bruststützen anbieten, die den Verbraucherbedürfnissen am besten entsprechen.

1. Dies ist nicht zur Unterstützung der oberen Extremität oder des Rumpfes zu verwenden, sondern ist ein Sicherheitspolster. Bitte achten Sie bei Bedarf auf die RumpfbalancemitentsprechendenPositionierungsgurten und bei Bedarf auf Armlehneinstellungen.


TRU
BALANCE[®]4
POWER POSITIONING SYSTEMS

Neue Parameter

Die neuen Parameterbildschirme werden unten zusammen mit der jeweiligen Definition aufgeschlüsselt. Die Option „Sitz“ im Programmiergerät wurde erweitert und zeigt nun mehr Optionen zum Programmieren sowie den Sitzkonfigurationsbildschirm. Diese Optionen stehen allen Programmierern zur Verfügung.

- 1. Gewichtskompensation:** Gewichtsbereiche für korrekte Timing-Berechnungen, wenn Positionsrückmeldung verwendet wird.
- 2. Memory Seat Latch Timeout:** Legt die Latch-Zeit der Positionsrückmeldungen fest.
- 3. Vordere Neigungs- und Übertragungsposition zurücksetzen:** Wenn die gespeicherte vordere Neigungsposition geändert werden muss, werden dadurch einfach die eingelernten vorderen Neigungspositionen und Übertragungspositionen gelöscht. Es wird auch auf die Standardposition zurückgesetzt.
- 4. Sitz-Override-Modus:** Wenn im Sitzsystem ein Fehler auftritt, kann das Sitzsystem die Einschränkungen im Sitzkonfigurationsbildschirm außer Kraft setzen. *Wichtig* Dieser Parameter sollte nur zur Fehlerbehebung verwendet werden und sicherstellen, dass der minimale oder maximale Hub eines Stellantriebs nicht überschritten wird. Dies führt zu irreversiblen Schäden an den Aktuatoren.

- 5. Aktuatorkalibrierung:** Dies wird nur verwendet, wenn ein Aktuator vor Ort ausgetauscht wird oder wenn auf dem Joystick oder dem Display eine Rückmeldungswarnung angezeigt wird.
- 6. Fußplatten zur Bodenhemmung** Wenn die Unterschenkelhöhe am AFP oder die STF-Höhe geändert wird, müssen Elevate- und AFP-Artikulation neu gelernt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die unabhängige Artikulation bei Verwendung an einer programmierten Stelle stoppt. Der Elevate ist ebenfalls Teil der Berechnungen und muss daher eingestellt bzw. eingelernt werden.

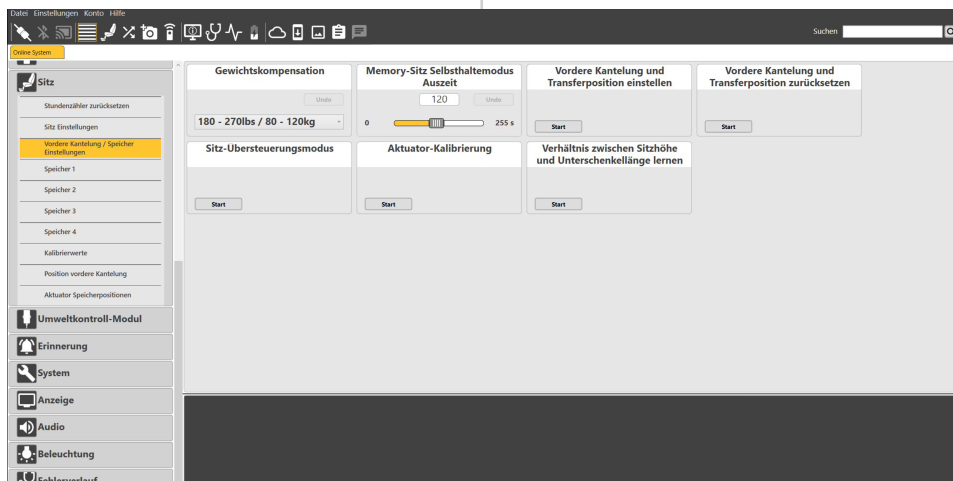

Speichernummer 1 - 4

Diese Speichernummern repräsentieren die 4 Speicherbildschirme im Q-Logic 3-System. Es gibt einen Vorwärtsbefehl und einen Rückwärtsbefehl, die in jeder Nummer programmiert werden können, wodurch acht (8) mögliche Speicher-sitzpositionen programmiert werden können.


- 1. Speicher:** Aktivieren oder Deaktivieren. Macht das Memory-Profil innerhalb des Sitzprofils sichtbar.
- 2. Operationstyp:** Synchronisiert oder sequenziell
 - Synchronisiert – Alle Antriebe bewegen sich gleichzeitig innerhalb der programmierten Bereiche, um die erreichte gespeicherte Speicherposition zu erreichen.
 - Sequenziell – Jeder Antrieb bewegt sich zu unterschiedlichen Zeiten, bis die programmierte Position erreicht ist. (Die Reihenfolge hängt von der Position des Neigungssystems ab.)

HINWEIS: Wenn die Ausgangsposition eine geringere Posterior-Neigung aufweist als die Memory-Position, ist die Reihenfolge Tilt, AFP, Recline und Lift.

HINWEIS: Wenn die Ausgangsposition mehr nach hinten geneigt ist als die Memory-Position, ist die Reihenfolge Recline, AFP, Tilt, Lift.

- 3. Betriebsmodus ändern:** Der Parameter ändert den Betrieb (synchronisiert oder sequenziell) sowohl für die Vorwärts- als auch für die Rückwärtsspeicherposition in jeder Speichernummer.
- 4. Latch:** Verriegelt die Position, sodass der Verbraucher den Eingangsbefehl nicht die ganze Zeit halten muss, während die Aktoren in Bewegung sind, um die programmierte Speicherposition zu erreichen. (Siehe Abschnitt zur Einstellung des Memory-Sitzplatzes für das Verriegelungstiming).
- 5. Vom Benutzer einstellbar:** Ermöglicht dem Verbraucher, die Speicherpositionen innerhalb dieser Speichernummer festzulegen.

- 6. Memory Text Zeile 1:** Parameter, der die Benennung der Sitzposition im Speicher des Vorwärtseingabebefehls ermöglicht. (maximal 15 Zeichen).
- 7. Speichertext Zeile 2:** Parameter, der die Benennung der Sitzposition im Speicher des Rückwärtseingabebefehls ermöglicht. (maximal 15 Zeichen).
- 8. Vorwärtsspeicherposition speichern:** Der Parameter speichert die Speicherposition, die den Vorwärtsbefehl darstellt. Diese Speicherposition wird erreicht, wenn ein Vorwärtsbefehl auf dem Eingabegerät ist.
- 9. Rückwärtsspeicherposition speichern:** Der Parameter speichert die Speicherposition, die den Rückwärtsbefehl darstellt. Diese Speicherposition wird erreicht, wenn ein Rückwärtsbefehl am Eingabegerät bereitgestellt wird.
- 10. Clear Seat Memory Slot Positionen:** Der Parameter löscht gespeicherte Speicherpositionen für die Nummer, um eine Neuprogrammierung zu ermöglichen.

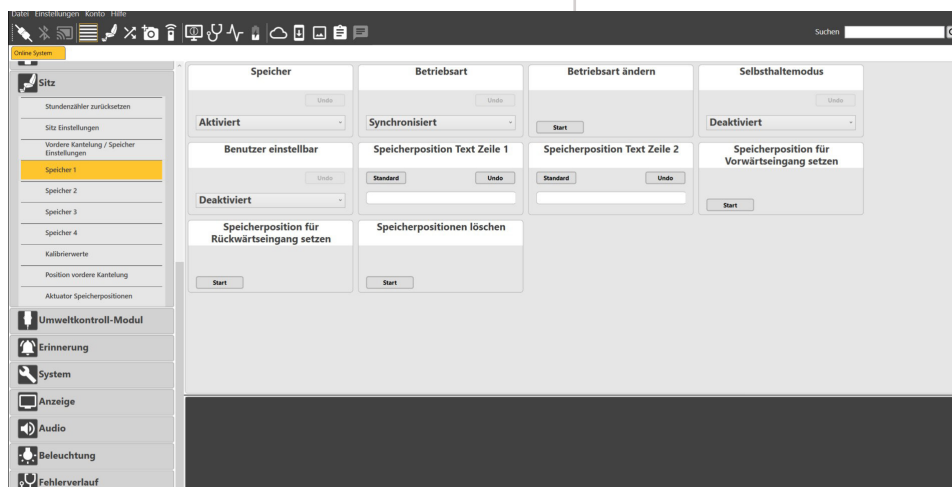

Programmierung des Elektrorollstuhls Out of Box

Bei Erhalt des Elektrorollstuhls müssen noch einige Programmierparameter in der Lieferung vervollständigt werden. Es wird nicht empfohlen, diese Funktionen zu programmieren, bevor der Verbraucher im Elektrorollstuhl sitzt. Es ist besser, diese zu absolvieren, während der Verbraucher im Sitzsystem sitzt, um maximale Funktionalität, Sicherheit und Komfort zu gewährleisten.

Programmierung der Gewichtskompensation

Die Programmierung der Gewichtskompensation ist entscheidend, da bei Verwendung der Positionsrückmeldung die Gewichtskompensation berücksichtigt wird, wenn die Aktuatoren in die programmierte Memoryposition fahren und alle gleichzeitig dieselbe Position erreichen.

1. **Parametereinstellungen/Programmeinstellungen**
2. Sitz
3. Einrichtung von Memory-Sitzplätzen
4. Gewichtsausgleich

Auf den Gewichtsbereich des Verbrauchers einstellen. Wenn sie programmiert ist, tritt die Elektronik in einen Programmiermodus ein. Sobald das System in den Programmiermodus wechselt, verlassen Sie den Programmiermodus (siehe Abbildung unten). Der Elektrorollstuhl ist jetzt bereit, die anteriore Kipp- und Transferposition zu lernen



Fußplatten zur Bodenhemmung

Dieser Parameter wird nicht immer verwendet, muss jedoch verwendet werden, wenn einer oder beide der folgenden Parameter bei der Lieferung oder nach einer Reparatur geändert werden.

HINWEIS: Für einen idealen kombinierten AFP-Betrieb wird eine Bewegung von etwa 5 cm zum Boden empfohlen.

Unterschenkelhöhe
STF-Höhe

HINWEIS: Die Teach-Funktion erfordert eine Bewegung von mindestens 3 % in Richtung Boden. Bei weniger als 3 % bricht die Teach-Funktion ab.

1. Parametereinstellungen/Programmeinstellungen

- Sitz
 - Einrichtung von Memory-Sitzplätzen
 - Elevate vs. AFP Artikulation unterrichten (Start)

Schritt 1

Fußplatten zur Bodenhemmung

Bringen Sie den Sitz in die Ausgangsposition. Stellen Sie sicher, dass sich der Sitz nicht in der vorderen Kantung befindet (A ist auf der Kantelaneige nicht sichtbar). Drücken Sie ok, um fortzufahren

Schritt 2

Fußplatten zur Bodenhemmung

Start Verhältnis zwischen Sitzhöhe und Unterschenkelhöhe lernen?

Schritt 3

Fußplatten zur Bodenhemmung

Lassen Sie die Sitzhöhe in der Ausgangsposition und bewegen Sie die Unterschenkelhöhe nach unten, um die Fußstützen knapp über den Boden zu bringen. Achten Sie darauf, dass genügend Platz bleibt, um den Boden nicht zu berühren. Drücken Sie anschließend auf ok.

Schritt 4


Fußplatten zur Bodenhemmung

Bewegen Sie die Sitzhöhe so weit nach oben, dass die Unterschenkelhöhe ganz ausgefahren werden kann. Bewegen Sie die Sitzhöhe nach unten, um die Fußstützen knapp über den Boden zu bringen. Achten Sie darauf, dass genügend Platz bleibt, um den Boden nicht zu berühren. Drücken Sie anschließend auf ok.

Schritt 5

Verhältnis zwischen Sitzhöhe und Unterschenkelhöhe lernen

Verhältnis zwischen Sitzhöhe und Unterschenkelhöhe lernen erfolgreich. Neue Werte speichern?

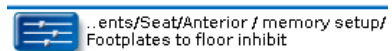

Anlernen der Fußplatten an die Bodenhemmung erfolgreich.
Neue Werte speichern?

Wenn die gelenkige Fußplattform näher an den Boden bewegt wird, schaltet die Power Base in die Antriebssperre. Dies soll sicherstellen, dass der Verbraucher seinen Elektrorollstuhl nicht fahren kann, während die Fußplatten näher am Boden sind, und möglicherweise seine Fußplattform beschädigen.

HINWEIS: Stellen Sie beim Erlernen der vorderen Neigungs- und Transferposition sicher, dass die Position der Bruststange und der Kniestützen nicht zu eng am Verbraucher anliegt. Wenn diese Geräte zu hoch oder zu niedrig sind, passen Sie sie nach Bedarf an, um maximale Unterstützung, Sicherheit und Komfort zu gewährleisten.

HINWEIS: Wenn das Einlernen dieser Funktion abgeschlossen ist und das Tru-Balance 4 Power Positioning System in die vordere Neigung geht, wird das System durch das erste Vorwärtsdrücken und Halten des Eingabegeräts in die eingelernte vordere Neigungsposition gebracht. Der zweite Vorwärtsbefehl am Eingabegerät bringt das System in die eingelernte Transferposition. Wenn keine separate Transferposition erforderlich ist, kann die Transferposition auf die gleiche eingestellt werden wie das vordere Kippsystem.

Programmierung der vorderen Neigungs- und Transferposition:

Die Programmierung der anterioren Neigungs- und Transferpositionen wird gleichzeitig abgeschlossen. Die Anterior Tilt kann bei Bedarf auch die Transferposition sein.

Stellen Sie sicher, dass sich der Benutzer im Elektrorollstuhl befindet, und wenn Knieblocker, Brustgurt und Bruststange benötigt werden, stellen Sie sicher, dass diese am Rollstuhl installiert sind.

1. **Parametereinstellungen/Programmeinstellungen**
2. Sitz
3. Einrichtung von Memory-Sitzplätzen
4. Anteriore Tilt- und Transferposition einlernen (Start)

Schritt 1

Einstellen der vorderen Kantelung und der Transferp...

Starten Sie den Lernvorgang für die Positionen Vordere Kantelung und Transfer?
Der Vorgang besteht aus zwei Schritten:
-Zuerst die Position Vordere Kantung anfahren und speichern.
-Dann die Transferposition anfahren und speichern.

Schritt 2

Einstellen der vorderen Kantelung und der Transferp...

Bewegen Sie den Sitz in die gewünschte Position für die Vordere Kantung. Drücken Sie ok, wenn die gewünschte Position erreicht ist.

Schritt 3

Einstellen der vorderen Kantelung und der Transferp...

Lernen der Vorderen Kantung erfolgreich.
Position der Vorderen Kantung speichern?

Schritt 4

Einstellen der vorderen Kantelung und der Transferp...

Bewegen Sie den Sitz in die gewünschte Transferposition.
Drücken Sie ok, wenn die gewünschte Position erreicht ist.

Schritt 5

Einstellen der vorderen Kantelung und der Transferp...

Lernen der Transferposition erfolgreich.
Position der Vorderen Kantung speichern?

Speicherprogrammierung

Die Programmierung der Speichernummer ermöglicht es dem Verbraucher, bis zu acht (8) Speicherpositionen in vier (4) Profilen zu haben, um am besten zu seiner Umgebung zu passen. Die Positionen können beliebig an die Umgebung angepasst programmiert werden.

HINWEIS: Speichernummer 1 wurde aus praktischen Gründen vom Hersteller konfiguriert. Ein Vorwärtsbefehl auf dem Speichersitz 1-Bildschirm wird das System nach vorne auf die maximale vordere Neigung und eine voreingestellte Neigungsposition neigen. Ein Rückwärtsbefehl bringt den Sitz in eine Ausgangsposition zurück. Diese Position sollte überprüft werden und kann bei Bedarf wie unten beschrieben geändert werden.

Aktivieren

1. Parametereinstellungen/Programmeinstellungen
2. Sitz
3. Speicher Nummer 1
4. Speicher (Aktivieren)

Der Betriebsmodus ist standardmäßig auf Synchronisiert, was bedeutet, dass sich jeder Antrieb gleichzeitig bewegt, wenn die Speicherposition programmiert wird.

HINWEIS: Diese Option wird nur Benutzern empfohlen, die als sicher erachtet werden, ihre eigenen programmierbaren Einstellungen vorzunehmen.

Vom Benutzer einstellbar

1. Parametereinstellungen/Programmeinstellungen
2. Sitz
3. Speichernummer 1 (oder 2, 3, 4, je nachdem)
4. Benutzer einstellbar (**Aktivieren**)

Sobald dies aktiviert ist, kann der Verbraucher die Speicherposition innerhalb der Q-Logic-Elektronik einstellen oder ändern.


Der Einzelne geht auf die einzustellenden Sitzfunktionen ein. Sie nehmen die Anpassung vor, um die gewünschte Position zu erreichen.

Navigieren Sie als Nächstes zum Hilfsprofil.

1. Markieren Sie „Speicherposition speichern“.
2. Geben Sie einen rechten Befehl

Speicherposition speichern

1. Wählen Sie, welchen Befehl sie für die gewählte Speicherposition verwenden möchten.
2. Führen Sie mit dem Eingabegerät einen rechten Befehl aus.
3. Wählen Sie das Häkchen bei einer Vorwärtseingabe, um eine Position hinzuzufügen und im System zu speichern.

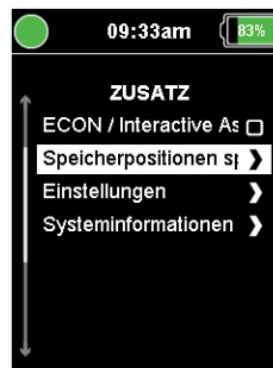

Memory Forward = Weiterleitungsbefehl auf ihrem Eingabegerät, wenn er sich im Sitzprofil auf dieser Speichernummer befindet.

Memory Reverse = Reverse-Befehl auf ihrem Eingabegerät, wenn sich das Sitzprofil auf dieser Speichernummer befindet.

Wenn der Verbraucher seine Memory-Sitzposition ändern möchte oder sich nicht sicher ist, kann er durch Aktivieren der Benutzereinstellung Änderungen an seiner Memory-Sitzposition vornehmen. Der Verbraucher kann nur die vom Benutzer einstellbaren Speichernummern sehen. Wenn der Therapeut eine bestimmte Position benötigt, kann diese Speichernummer deaktiviert bleiben.





USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.quantumrehab.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L3J 1V4
www.quantumrehab.ca

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.quantumrehab.com.au

New Zealand

391 Neilson Street
Penrose, Auckland 1061
www.pridemobility.co.nz

UK

(Authorised UK Representative)
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.quantumrehab.co.uk

The Netherlands

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.quantumrehab.eu
www.quantumrehab.nl

Switzerland

(Authorised CH Representative)
SODIMED SA
Chemin Praz Devant 12
1032 Romanel-sur-Lausanne

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.quantumrehab-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.quantumrehab.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.quantumrehab.es

Germany

Josef-Förster-Straße 6-8
33161 Hövelhof
www.quantumrehab.de

China

Room 508, Building #4
TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road
Pudong New Area
Shanghai 201318
www.pridechina.cn

